

Prisma Vent 30-C / 40

# Einschulungsprotokoll

Klinik Penzing

Respiratory Monitoring Unit (RMU)

Tel. 01/91060/41440

**von**

Klebeetikette

Weitere Personen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

# Prisma Vent 30-C / 40

## Geräteerklärung

**Alarm/Quittierung**

**Wesel der Programme**

**Befeuchter-Taste**

**Ein/Aus-Taste**

**Drehknopf/Menu**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Geräteerklärung

**Anschluss für beheizbaren  
Schlauch (möglich)**

**Anschluss für den  
Beatmungsschlauch**




# Prisma Vent 30-C / 40

## Geräteerklärung

### Rückseite des Geräts

**Entriegelung für die  
Seitenabdeckung zum  
Anschluss der Heizung**


**Filter**

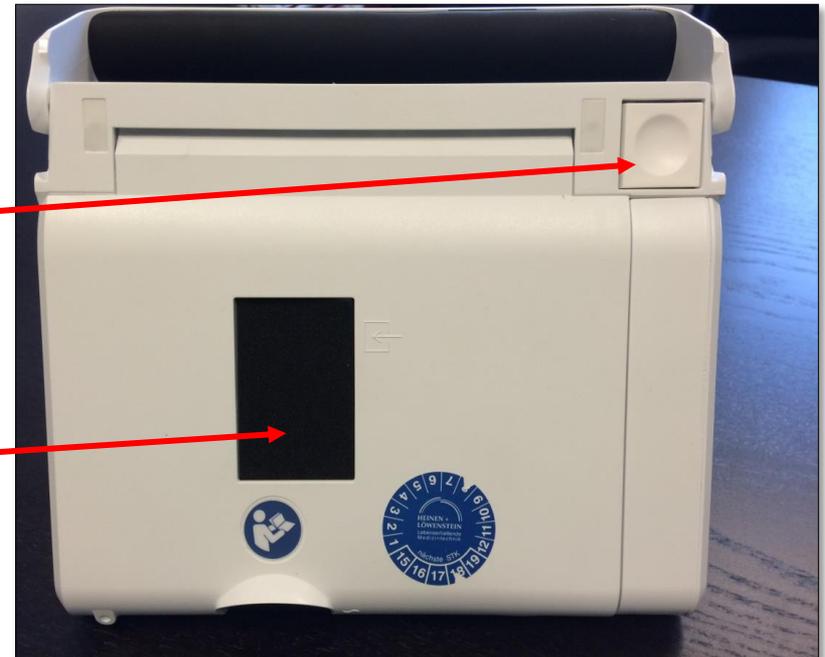

# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

**Entriegelung bestätigen  
und Seitenteil entfernen,  
um die Heizung  
anschließen zu können**

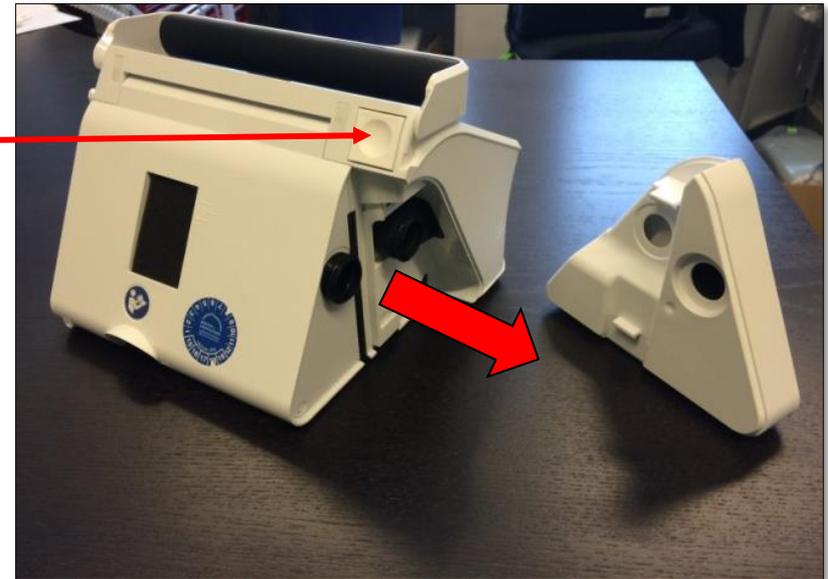


# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

Heizung

Heizung an die Maschine  
anschließen

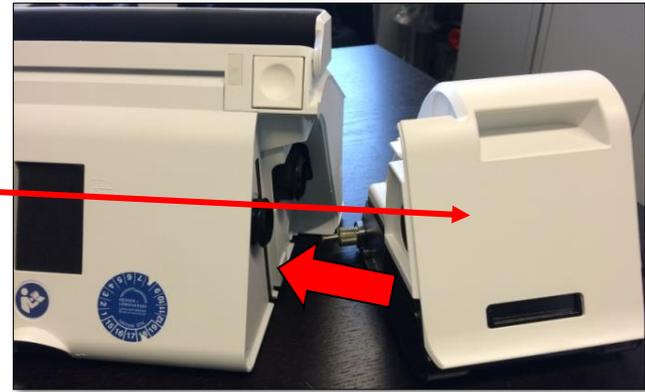

# Prisma Vent 30-C / 40


**Zusammenbau des Geräts**  
**Netzteil an die Maschine**  
**anschließen**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizungstopf

**Zum Öffnen der Heizung muss an der Lasche nach oben gezogen werden**

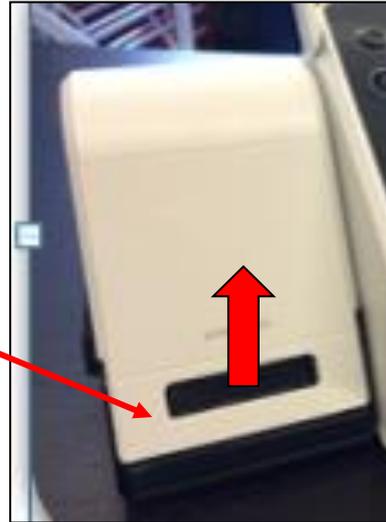


# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizungstopf

### Bestandteile

- **Oberteil**
- **Silikonteil bzw. Mittelteil**
- **Unterteil bzw. Behälter**

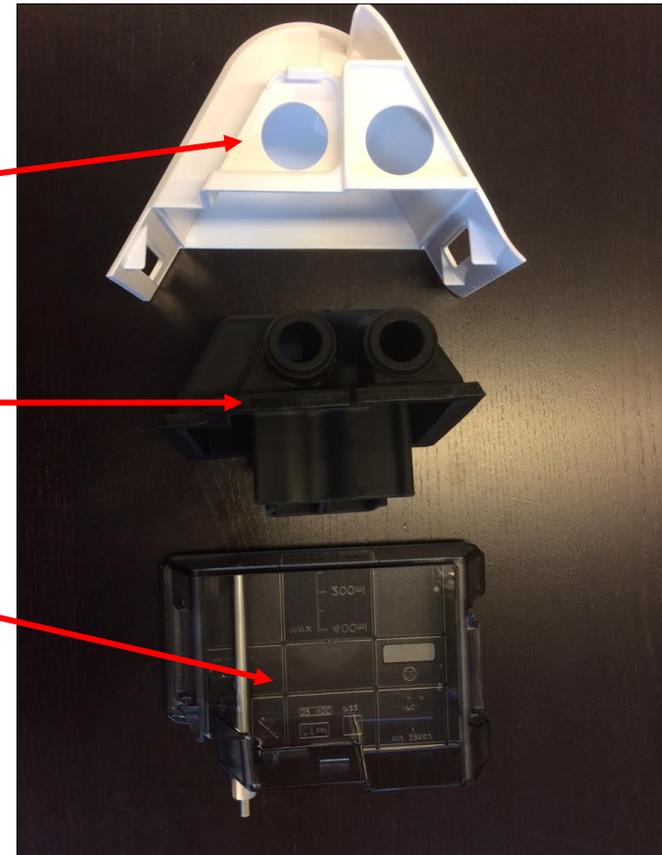

# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

**Schlauch an die Maschine  
und die Maske  
anschließen**

**Bevor die Beatmung  
gestartet wird, muss die  
Heizung befüllt werden**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

**Sauerstoffverlängerung  
an den Sauerstoffadapter  
anschließen**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

**Danach den  
Beatmungsschlauch an  
den Sauerstoffadapter  
anbringen**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Zusammenbau des Geräts

**Danach den  
Beatmungsschlauch an die  
Beatmungsmaske  
anschließen**




# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizung befüllen

Es gibt 2 Methoden

**1. Befüllung im  
zusammengebauten  
Zustand erfolgt über die  
beiden Öffnungen der  
Heizung**

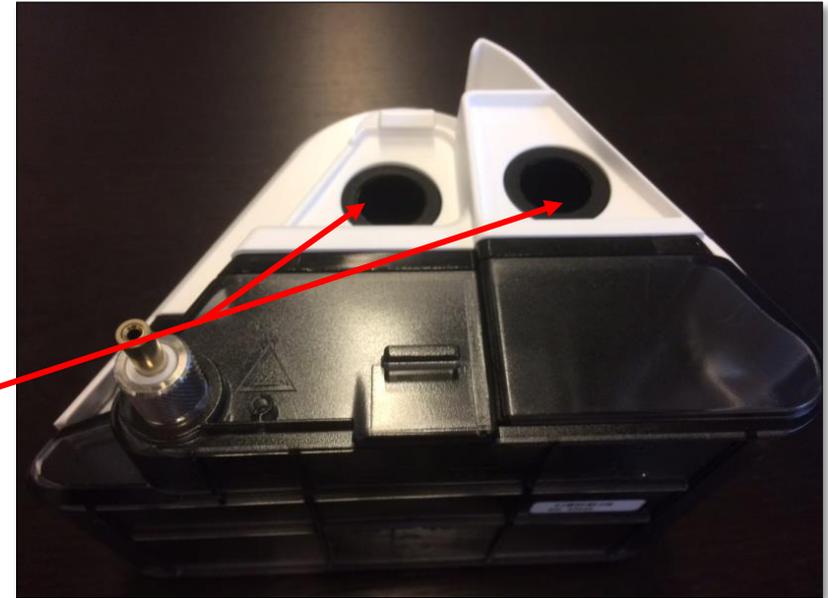

# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizung befüllen

Es gibt 2 Methoden

2. Den Oberteil der  
Heizung abnehmen und  
den Unterteil bzw.  
Behälter befüllen



# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizung befüllen

**Den Wasserbehälter mit  
destilliertem, sterilem  
Wasser aus der Apotheke  
befüllen**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Heizung befüllen

**Zuletzt kontrollieren Sie den Wasserstand der Heizung.**

**Der Maximalwert darf nicht überschritten werden.**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Einstellung der Temperatur

Temperaturknopf länger  
gedrückt halten



# Prisma Vent 30-C / 40

## Einstellung der Temperatur

**Befeuchter-Stufe mittels Drehknopfes einstellen**

**(1 bis 6)**

**Bestätigung durch Druck am Drehknopf**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Einstellung der Temperatur

Mit dem Drehknopf die richtige Temperatur einstellen  
(1 bis 6)



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Geben Sie Wasser mit  
Flüssigseife in einen  
Behälter**

**Waschen Sie den Schlauch  
sorgfältig**

**Einmal pro Woche!**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Spülen Sie den  
Beatmungsschlauch  
sorgfältig mit Wasser aus  
und hängen Sie ihn zum  
Trocknen auf**

**Einmal pro Woche!**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Hängen Sie den  
Beatmungsschlauch zum  
Trocknen z. B. über einem  
Wäscheständer auf**

**Einmal pro Woche!**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Sauerstoffadapter  
abspülen und trocknen**

**Einmal pro Woche!**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Reinigen Sie die Maske  
täglich mit Seifenwasser  
und trocknen sie diese  
anschließend gut ab**

**Einmal pro Tag!**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Waschen Sie die  
Maskengurte mit der  
Hand in Seifenwasser**

**Lassen Sie die  
Maskengurte gut trocknen**



# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene

**Unterteil der Heizung  
muss täglich gereinigt  
werden**

**Oberteil mit Feuchttuch  
abwischen**




# Prisma Vent 30-C / 40

## Hygiene-Filter

**Feinfilter (weiß) einmal pro Monat wechseln**

**Grobfilter wenn verschmutzt reinigen und wieder einsetzen**

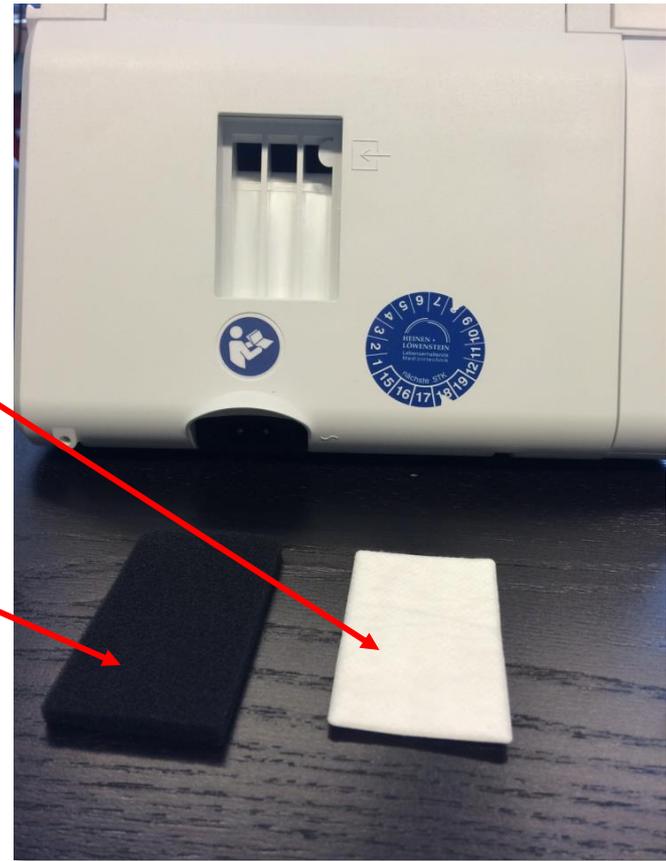

# Prisma Vent 30-C / 40

| Datum | FN | Kommentar | Note | HZ |
|-------|----|-----------|------|----|
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |

FN= Foliennummer

Notensystem: 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend, 4= genügend, 5= nicht genügend

# Prisma Vent 30-C / 40

| Datum | FN | Kommentar | Note | HZ |
|-------|----|-----------|------|----|
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |

FN= Foliennummer

Notensystem: 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend, 4= genügend, 5= nicht genügend

# Prisma Vent 30-C / 40

| Datum | FN | Kommentar | Note | HZ |
|-------|----|-----------|------|----|
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |
|       |    |           |      |    |

FN= Foliennummer

Notensystem: 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend, 4= genügend, 5= nicht genügend

# Prisma Vent 30-C/ 40

Wurde auf die Handhabung des Respirators eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

Erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)

# Prisma Vent 30-C/ 40

Wurde auf die Hygiene des Respirators eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

Erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)